



WEBDIA

Gestion du diabète....

Partage de mes informations avec mon entourage ainsi que le personnel soignant.

Les médecins peuvent s'inscrire et suivre à distance les données de leurs patients avec leur autorisation.

La configuration, qui va permettre de calculer vos injections d'insuline, doit être réalisée par un médecin diabétologue !

WEBDIA – Gestion de mon diabète



WEBDIA - disponible sur Apple Store et Google Play



WEBDIA - disponible sur PC www.webdia.ch



INSCRIPTION



Saisir :

- Civilité
- Nom
- Prénom
- Adresse email
- Mot de passe
- Confirmation mot de passe
- Code
- Valider les conditions d'utilisation


Un email de confirmation d'inscription vous sera envoyé l'adresse indiquée !

ACCUEIL




MENU

Menu - Connecté

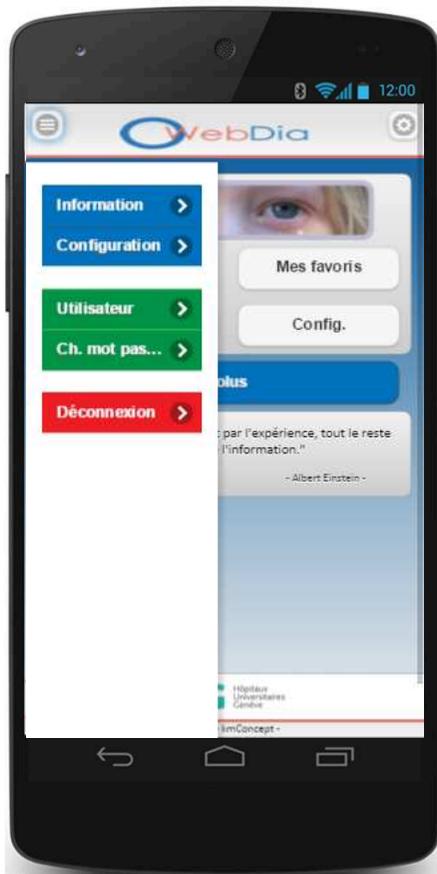

Menu - Déconnecté

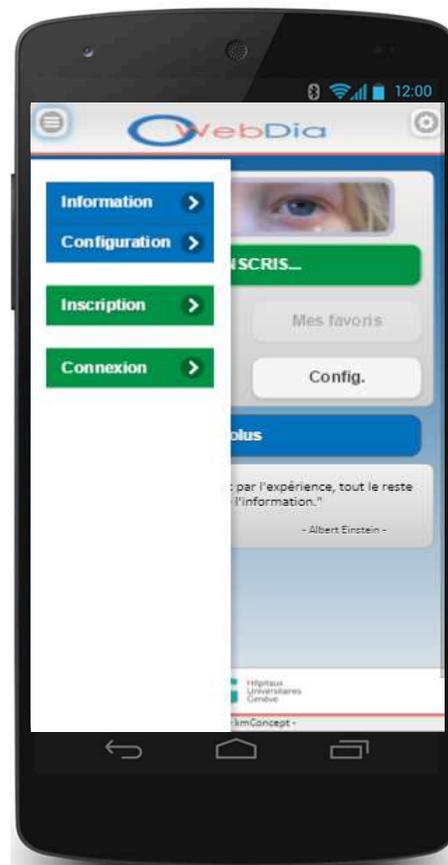

- Information : conditions d'utilisation
- Configuration : écran de configuration
- Inscription : écran d'inscription
- Connexion : écran de connexion
- Utilisateur : écran des données utilisateur; nom, prénom...
- Ch. Mot de passe : écran de changement de mot de passe.

CONNEXION




Lors de votre inscription, vous avez donné une adresse email de connexion et votre mot de passe, que vous devez saisir sur cet écran.

Si vous avez oublié votre mot de passe, un courriel avec les données de connexion vous sera envoyé.

Il est possible d'utiliser l'application sans s'inscrire, mais les fonctionnalités seront restreintes !

CONFIGURATION

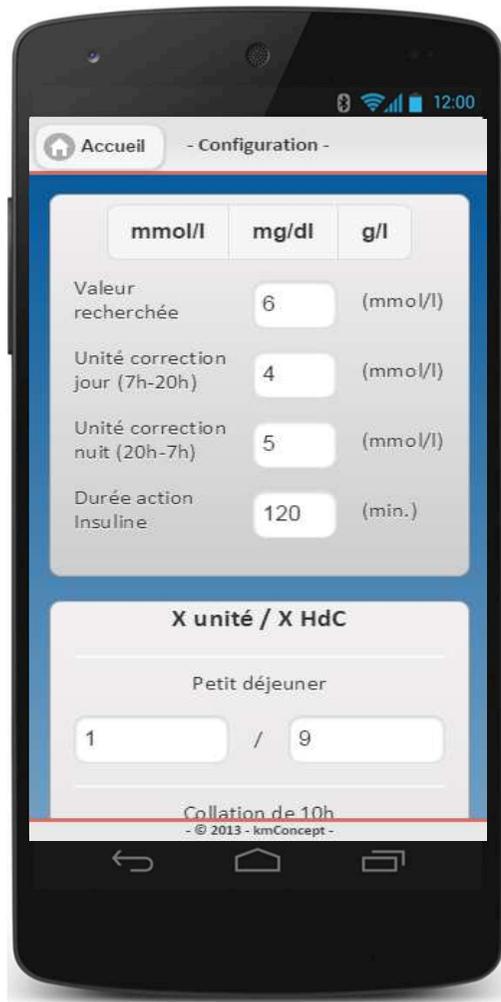

1. Sélectionner l'unité
 - mmol/l ou mg/dl ou g/l
2. Saisir la valeur recherchée
 - correspond à la valeur de glycémie que vous souhaitez atteindre
3. Unité de correction (jour et nuit)
 - correspond à la correction de votre glycémie pour l'injection d'une unité d'insuline
4. Durée d'action Insuline
 - correspond à la durée d'action de l'insuline.

La configuration, qui va permettre de calculer vos injection d'insuline, doit être réalisée par un médecin diabétologue !

CONFIGURATION



Saisie du nombre de **X Unité / X HdC** qui correspond **au nombre d'unité d'insuline** permettant de corriger le **nombre de glucides** ingérés.

Ex: 1/9 cela indique que pour 9 gr. de Glucide il faut injecter 1 unité d'insuline.

Ex: Petit déjeuner 1/9

- > si je mange 45 g. de glucide au petit déjeuner,
- > je vais injecter : $45/9 = 5$ unités d'insuline.

Une fois la configuration saisie et validée, un email qui récapitule votre configuration vous est envoyé !

CALCUL BOLUS



1. Saisie du nombre de glucides ingérés
2. Sélection du repas de la journée
3. Saisie de la glycémie



Calcul injection :

- calcule les unités d'insuline à injecter en fonction des glucides ingérés, de la glycémie et du schéma de traitement

CALCUL BOLUS




Si le temps indiqué entre les 2 bolus est inférieur à la **Durée d'action de l'insuline** saisie dans votre configuration, un message d'alerte apparaît !

Dans ce cas, la glycémie est bloquée à la valeur recherchée, afin de ne pas effectuer de correction supplémentaire.

Il est toujours possible de **Débloquer** la glycémie !

REPAS

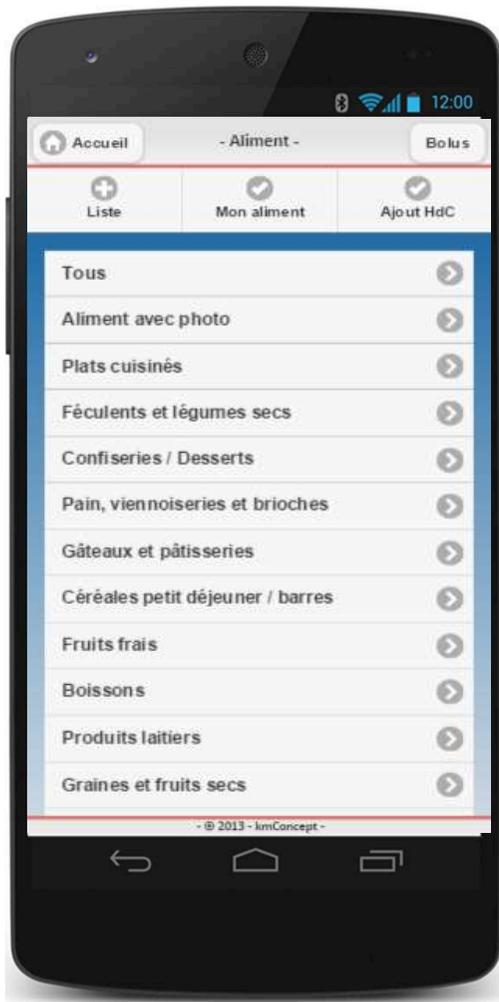


Le bouton aliment vous permet d'accéder aux familles d'aliments.

Dans chacune des familles vous aurez accès aux aliments qui la compose.

Si vous sélectionnez **TOUS**, les aliments s'afficheront en fonction des lettres saisies !



QUANTITE

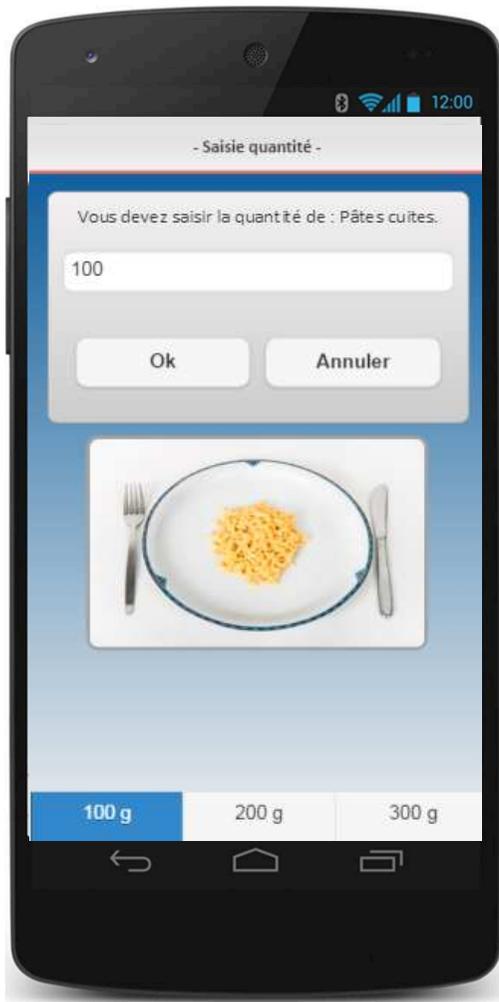

Une fois l'aliment sélectionné, vous pouvez saisir la quantité.

Pour certain aliment, une photo permet de se rendre compte de la quantité dans une assiette.

Le bouton **AJOUT** (en haut à droite) permet de sélectionner un autre aliment et de composer un repas !



MON ALIMENT



Vous devez indiquer le nombre de glucides pour 100 gr ou 100 ml et la quantité d'aliment que vous allez manger.

Ainsi, la quantité de glucides correspondante à votre aliment sera ajoutée à la composition de votre repas.

Vous avez également la possibilité d'utiliser **Ajout HdC** pour ajouter une quantité de glucides à votre repas !




AJOUT GLUCIDES



La quantité de glucides ajoutée sur cet écran sera automatiquement reportée sur l'écran de droite et pris en compte dans le calcul d'injection d'insuline.



DONNEES

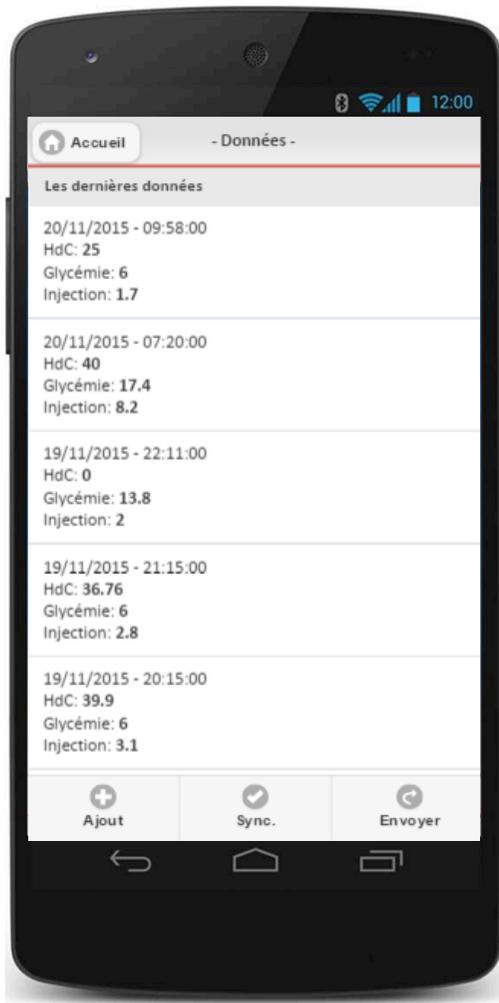


L'écran données, permet de consulter les derniers calculs effectués sur cet appareil ou sur tout autre appareil connecté au compte.

Le bouton Ajout permet d'ajouter manuellement des informations d'injection


Le bouton **Sync.** permet de synchroniser les données !



DONNEES

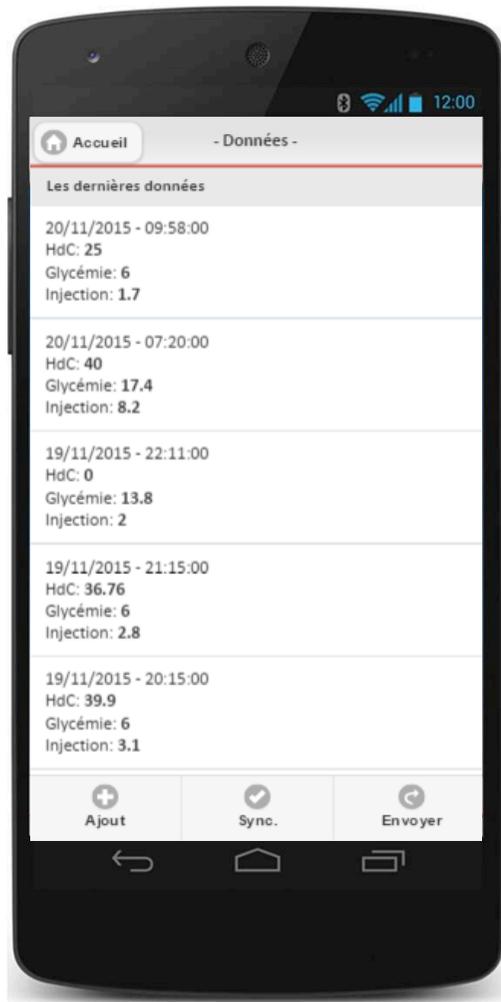

Vous avez la possibilité d'envoyer par email les données du dernier mois.

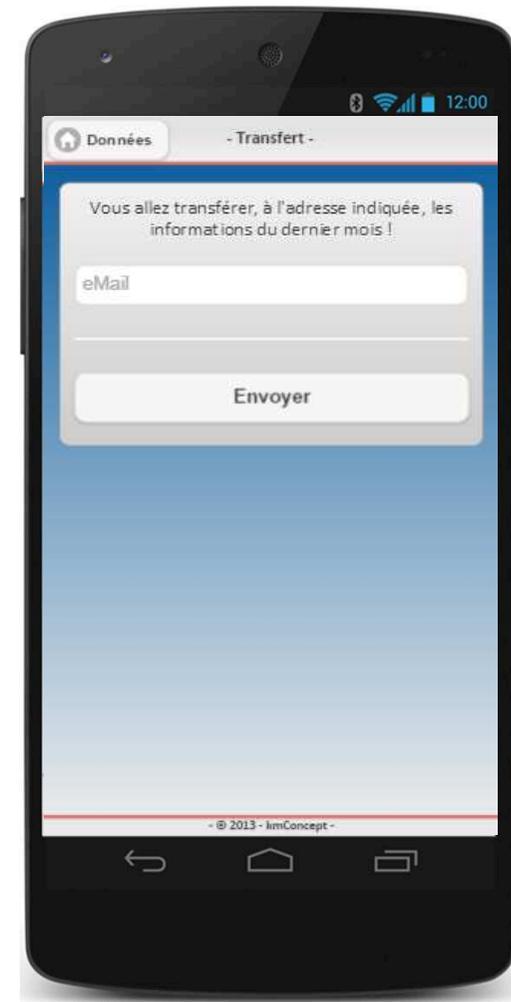

MES FAVORIS




Le bouton Favoris permet de créer un nouveau repas favori.

Sélectionner un des aliments qui va composer votre repas favori.



Saisir le nom du repas favori.

Le bouton **Ajout** permet d'ajouter un autre aliment qui composera votre favori !

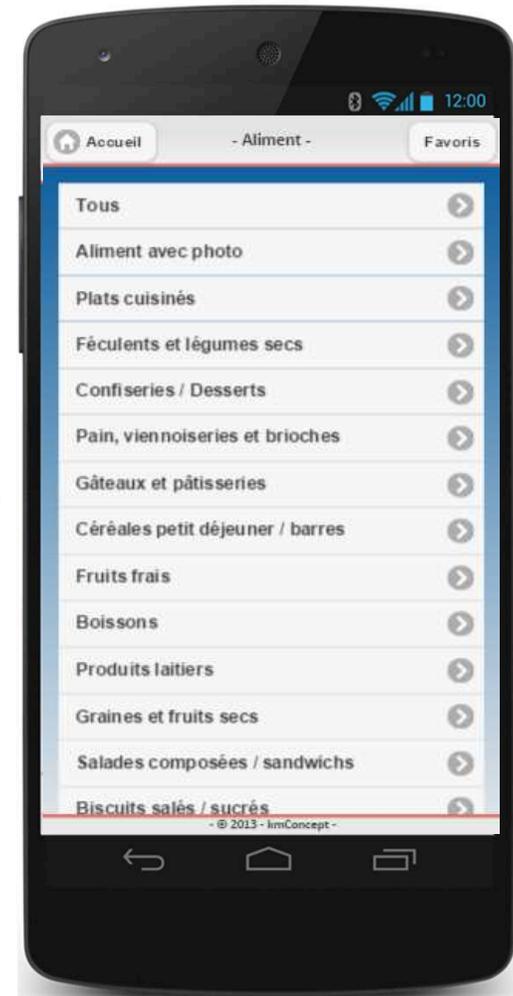

MES FAVORIS



Sélection d'un favori



Il est toujours possible, une fois le repas favori affiché, de changer la quantité des aliments qui le composent !

Le bouton **Supprimer**, permet de supprimer le favori affiché

INFORMATIONS

Information – Contact

info@webdia.ch

Accompagnement médical

Prof. V. Schwitzgebel et Dr. P. Klee. Unité d'endocrinologie et de diabétologie pédiatriques.
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Genève, Suisse

Conditions d'utilisation

Responsabilité

- Tous les calculs doivent être confirmés avant utilisation. Cet outil applique des calculs théoriques et ne peut en aucun cas remplacer l'expérience de l'utilisateur ou la connaissance du schéma de traitement et les informations du programme doivent être interprétées avec précautions. Cet outil ne peut se substituer à un jugement clinique ! En cas de dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation (ou de l'impossibilité d'utilisation) de Webdia, ni l'auteur, ni les HUG ne peuvent être tenus pour responsables.

Sécurité des données

- Le fonctionnement de Webdia dépend d'un serveur externe à l'appareil mobile. Ce serveur est localisé en Suisse. La transmission des données entre les appareils mobiles et le serveur se fait de manière anonyme et sécurisée. Toutefois, l'auteur et les HUG déclinent toute responsabilité concernant la sécurité des données échangées. Les frais d'utilisation du réseau téléphonique pour échange des données sont à la charge de l'utilisateur.